

X線用ブッキー撮影台 SA-83

被検者の負担を軽減し、X線撮影をさらに効率化。



Sankyo

低床設計だから、乗り降りスムーズ。

細部まで行き届いた設計がSA-83の特長です

- 油圧式で天板の高さを最下位330mmまで下げられるので被検者の負担を軽減し、術者の撮影業務の効率も向上します。
- キャスターを標準装備していますので移動が簡単になり、さらにアジャスター機能も備わっていますので床とのレベル調整が可能です。

昇降の中間一時停止も簡単に調整可能

- 上下両方向から撮影位置に一時停止できます（上下2系統を準備）。
- 工具不用、設置後の位置変更もマイクロスイッチをスライドさせるだけで簡単に調整できます。
- スモークアクリルの天板（透明アクリルも選択可能）と、操作音の静粛性が向上した電磁オフロックマグネットの採用により、被検者の方に最もやさしい設計です。フットスイッチもしくは、テープスイッチの操作でフローティングします。
（天板の長手側±500mm 短手側±115mmの両方にスライド）



X線用ブッキー撮影台

SA-83

特長



- つま先が入るスペースを確保
作業姿勢に無理がなく、撮影業務をスムーズに遂行できます。

標準装備




- キャスター標準装備
本体底部にキャスターを標準装備しました。アジャスターを緩めると簡単に移動できます（レントゲン室内の移動に限りです）。
- 工具不用のアジャスター
手で廻すだけで床とのレベルが調整できます。


オプション



■マット

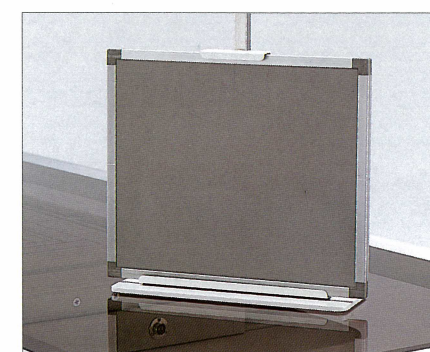

■側面カセットホルダー

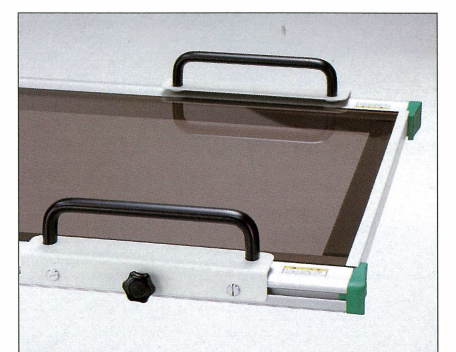

■グリッド

- その他オプション
・カーボン天板 ・圧迫帯（マジックバンド式） ・グリッド規格変更
・管球連動ポテンションメーター（X線装置側も改造が必要です）
・オートセンタリング機構の付いた製品もご用意できます。

電動と手動を複合し、さまざまな撮影位置にスピーディに対応します。


●主な仕様

	固定グリッドタイプ	ブッキータイプ
天板部外寸(幅×奥行×厚みmm)	2000×800×10mm	
天板材質	スモークアクリル樹脂(厚10mm)	
天板面の高さ(mm)	床上330～最高870mm	
天板移動範囲(mm)	長手±500mm・短手±115mm(手動式)	
天板固定方法	電磁オフロック式	
受像部移動範囲(mm)	190mm	130mm
グリッド	格子比8:1 集束距離120cm 60本/cm	格子比8:1 集束距離120cm 34本/cm
カセットサイズ	半切縦横以下各サイズ	
天板表面とフィルム間	約45mm	約65mm
ホトタイマー受光部	各装置メーカー取付可能	
電 源	AC100V 0.7KVA 50/60HZ	
重 量	約210kg	

※駆動方式は油圧式です。

医療用具製造業許可番号 27BZ5023

●外形寸法図 (単位:mm)

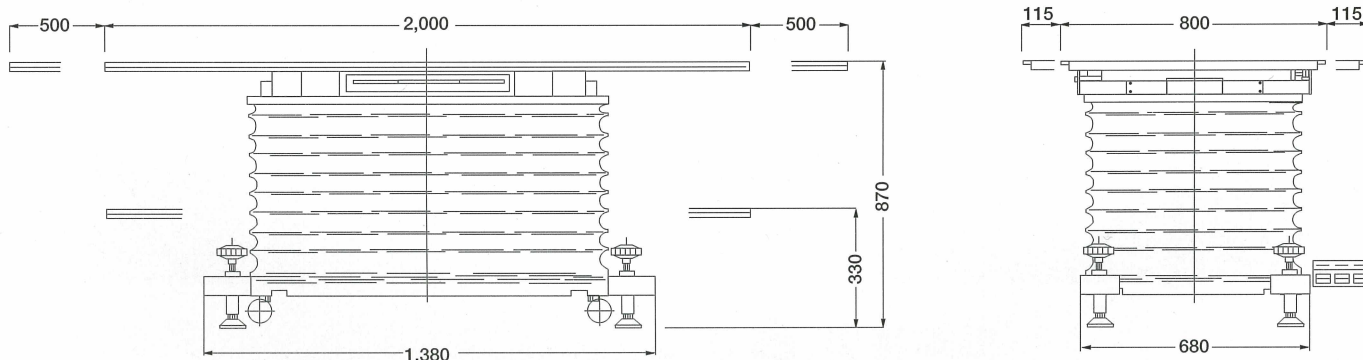

※仕様は改良のために変更する事がありますので、あらかじめお断りいたします。

ご用命は

〒270-2231 千葉県松戸市稔台1-14-2
TKプランニング
 TEL 047-703-5670 FAX 047-703-5685

三共医療機株式会社

- 本社・工場 〒578-0901 東大阪市加納6丁目7番43号
 TEL 072-875-3068 FAX 072-875-3069
- 東京営業所 〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-6-4
 TEL 03-5649-9090 FAX 03-3249-2082
- 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3丁目12番1号
 TEL 092-413-0250 FAX 092-413-9198